



# Levilog

## Bruksanvisning

Dato: 25. mai 2026

Dokumentnummer: AT06-17 (NO)

Dokumentversjon: 4.0

Produktversjon: 1.0

Produkt-ID: AT06

Grunnleggende UDI-DI: 73323531000LX

CE

<b>Levilog</b>	<b>1</b>
1. Om Levilog	3
1.1 Produsent	4
1.2 Tiltent bruk	4
1.3 Hvem kan bruke Levilog?	4
1.4 Kontraindikasjoner	5
1.5 Hvordan fungerer Levilog?	5
1.5.1 Medisinpåminnelser til rett tidspunkt	5
1.5.2 Logge dosene dine	5
1.5.3 Du må ha en gyldig resept	5
2. Informasjon om risiko og nytte	6
2.1 Risikoer ved bruk av Levilog	6
2.2 Fordeler ved å bruke Levilog	6
2.3 Advarsler og forholdsregler	6
2.4 Rapporter alvorlige hendelser	8
3. Kom i gang	8
3.1 Tekniske krav	8
3.2 Programvareoppdateringer og systemkrav	8
3.2.1 Programvare- og sikkerhetsoppdateringer	8
3.2.2 Systemkrav	9
3.3 Installasjon	9
3.3.1 Slik installerer du Levilog på din iPhone eller iPad:	9
3.3.2 Slik installerer du Levilog på Android:	10
3.4 Registrering	10
3.4.1 Verifisere resepten din	10
3.4.2 Gi appen tillatelse til å behandle dataene dine.	11
3.4.3 Opprette konto	11
3.4.4 Opprette doseringsskjemaet ditt	11
3.4.5 Aktivere varsler	12
3.4.6 Angi påminnelser for påfylling av medisin	13
3.5 Logge inn	14

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

4. Slik bruker du Levilog	15
4.1 Varsler	15
4.2 Din dag	15
4.3 Historikk	16
4.4 Medisin	16
4.5 Innstillinger	17
4.6 Hvor ofte bør du bruke Levilog?	19
5. Teknisk støtte	20
5.1 Kontakt støtten	20
5.2 Tilbakestill passord	20
5.3 Skriv ut bruksanvisningen	20
6. Ordliste over ISO-symboler	22
7. Kontaktinformasjon	24

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

# 1. Om Levilog

## 1.1 Produsent

Navamedic AB  
Göteborgsvägen 74  
433 63 Sävedalen  
Sverige

## 1.2 Tiltenkt bruk

Levilog er tiltenkt å støtte behandlingen av Parkinsons sykdom ved å lette overholdelse av foreskrevet medisiner. Levilog gir pasienter påminnelser for å hjelpe dem med å ta riktig dose til rett tidspunkt, samt å logge og følge opp eget medisininntak.

## 1.3 Hvem kan bruke Levilog?

Levilog er beregnet på deg dersom

- du bruker et legemiddel som distribueres ved hjelp av en OraFID-dosedispenser for å behandle Parkinsons sykdom
- du er 18 år eller eldre
- du er kjent med hvordan man bruker smarttelefoner og mobilapper

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

## 1.4 Kontraindikasjoner

Appen skal kun brukes til å håndtere legemiddelbehandlinger som distribueres ved hjelp av en OraFID. Det egner seg ikke å bruke den til å håndtere noen andre medisiner.

## 1.5 Hvordan fungerer Levilog?

### 1.5.1 Medisinpåminnelser til rett tidspunkt

Levilog kommer til å sende varsler for å varsle deg når det er på tide å ta legemiddeldosen din. Når du trykker på et varsel, åpnes appen slik at du kan registrere at du har tatt dosen. Levilog sender også varsler når du begynner å gå tom for tabletter i den nåværende OraFID-dispenseren din, slik at du kan sørge for at du har en ny dispenser klar.

### 1.5.2 Logge dosene dine

Du kan navigere til «Din dag»-skjermbildet for å logge planlagte doser eller ekstra doser av medisinen din.

Jo mer nøyaktig du logger inntaket av medisinen din, desto bedre kommer appen til å fungere for deg. Du kommer for eksempel til å motta passende påminnelser når OraFID-dispenseren din er i ferd med å gå tom, en korrekt historikk samt innsikt i hvor mye medisin du har tatt fra dag til dag.

### 1.5.3 Du må ha en gyldig resept

For å få tilgang til Levilog trenger du en gyldig resept på en medisin som distribueres i en OraFID-dispenser. For å kunne opprette en konto må du derfor bekrefte resepten din ved å skanne et nummer på legemiddelets forpakning eller

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

dosedispenseren din, så sørg for at du har medisinen din i nærheten første gang du åpner appen.

## 2. Informasjon om risiko og nytte

### 2.1 Risikoer ved bruk av Levilog

Det finnes ingen kjente alvorlige risikoer ved å bruke Levilog. Det er derimot et støtteverktøy, og bør ikke brukes som den eneste metoden for å sikre korrekt medisinbehandling. Levilogs funksjonalitet avhenger av korrekt brukerinndata, riktige systeminnstillinger og en stabil internettilkobling.

### 2.2 Fordeler ved å bruke Levilog

Levilog hjelper deg med å følge den foreskrevne doseringen din. Ved å ta medisinen din på hvert foreskrevne tidspunkt i henhold til legens ordinasjon, øker du sjansene for å få en stabil lindring av symptomene dine.

### 2.3 Advarsler og forholdsregler

- **For å motta medisinpåminnelser må du tillate at appen sender varsler.** Du kommer til å bes om å tillate dette når du oppretter kontoen din. Dersom du sier nei, kan du senere gå inn i telefonens innstillinger og aktivere varsler.

Dokumentnummer:  
AT06-17 (NO)

Dokumentversjon  
4.0

Dato:  
25. mai 2026

Produktversjon  
1.0

- **For å fortsette å motta medisinpåminnelser må du åpne appen minst én gang om dagen når telefonen er koblet til internett.** På denne måten sikrer du at appen alltid kan planlegge nye varsler.
- **For å alltid motta påminnelser fra Levilog, må du sørge for at telefonen eller nettbrettet ikke går tomme for batteri.**
- Når du bruker kameraet for å legge til eller oppdatere doseringsskjemaet, kan det være noen begrensninger, siden KI-en som analyserer bildet kan gjøre feil. **Derfor er det viktig at du alltid kontrollerer antall tabletter og tidspunktene for dosene dine når du oppretter skjemaet ved hjelp av kameraet.** På denne måten kan du sikre at skjemaet ditt stemmer overens med det legen din har foreskrevet.
- **Endre skjemaet utelukkende i henhold til legens instruksjoner.** Levilog er designet slik at du selv skal kunne tilpasse doseringsskjemaet ditt i appen i henhold til direktivene gitt av legen din. Det er derfor viktig at du følger disse anvisningene nøye.
- **Vær oppmerksom på at funksjonen «Gjenværende tabletter» påvirkes av startdatoen og hvordan du logger dosene dine.** Appen beregner det totale antallet tabletter i dosedispenseren og trekker automatisk fra de planlagte dosene dine, selv om du ikke logger dem aktivt. Dersom du legger til ekstra doser, markerer doser som «glemte», eller endrer antall tabletter i en dose, tar appen hensyn til disse endringene og oppdaterer beregningen av gjenværende tabletter.
- Når du reiser, justeres medisinskjemaet ditt automatisk til telefonens tidssone. Dersom du for eksempel skal ta en dose kl. 8.00 og reiser til en annen tidssone, kommer du til å motta en påminnelse om å ta dosen kl. 8.00 i den nye tidssonen. **Før du reiser mellom ulike tidssoner, er det viktig at du diskuterer hvordan du best håndterer medisinskjemaet med legen din.**

Dokumentnummer:  
AT06-17 (NO)

Dokumentversjon  
4.0

Dato:  
25. mai 2026

Produktversjon  
1.0

Rapporter negative eller uønskede hendelser, tilløp og ulykker relatert til bruken av Levilog til Navamedis AB og Läkemedelsverket.

## 2.4 Rapporter alvorlige hendelser

Rapporter negative eller uønskede hendelser, tilløp og ulykker relatert til bruken av Levilog til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten du er etablert i, dvs. Läkemedelsverket (i Sverige), Skattestyrelsen – Central Customs Division (i Danmark), Fimea – Läkemedelsverket (i Finland) og Legemiddelverket (i Norge).

Informér produsenten, Navamedic AB, via e-post: [info@navamedic.com](mailto:info@navamedic.com).

## 3. Kom i gang

### 3.1 Tekniske krav

For å bruke Levilog trenger du tilgang til en smarttelefon eller et nettbrett med iOS 18 eller senere, eller Android 15 eller senere. Du må også ha en pålitelig internettforbindelse.

### 3.2 Programvareoppdateringer og systemkrav

For å sikre at enheten fungerer sikkert og effektivt, gjelder følgende bestemmelser for programoppdateringer og kompatibilitet med operativsystemer:

#### 3.2.1 Programvare- og sikkerhetsoppdateringer

- Applikasjonen kan motta regelmessige programoppdateringer, inklusive sikkerhetsoppdateringer, ytelsesforbedringer og nye funksjoner.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

- Oppdateringer leveres via de offisielle distribusjonsplattformene for apper (Apple App Store eller Google Play Store).
- Alle oppdateringers integritet og ekthet valideres automatisk av plattformen før installasjon.
- Det anbefales å aktivere automatiske oppdateringer for å sikre at enheten alltid kjører den seneste validerte programvareversjonen.

### 3.2.2 Systemkrav

- Kompatibilitet med nyere operativsystemer overvåkes og testes regelmessig. Brukere kan trenge å oppdatere operativsystemet på enheten for å ivareta sikkerhet og funksjonalitet.
- Bruk av applikasjonen på operativsystemer som ikke støttes eller er for gamle, kan føre til begrenset funksjonalitet eller at det ikke går an å bruke den.

## 3.3 Installasjon

### 3.3.1 Slik installerer du Levilog på din iPhone eller iPad:

1. Åpne App Store.
2. Skriv «Levilog» i søkefeltet og finn appen med et ikon som ser ut som den vedlagte logotypen.



3. Trykk på «Installer».
4. Angi passordet ditt for Apple ID.
5. Når appen er installert, trykker du på appens ikon for å åpne Levilog.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

### 3.3.2 Slik installerer du Levilog på Android:

1. Åpne Google Play Store.
2. Skriv «Levilog» i søkefeltet og finn appen med et ikon som ser ut som den vedlagte logotypen.



3. Trykk på «Installer».
4. Når appen er installert, trykker du på appens ikon for å åpne Levilog.

## 3.4 Registrering

Når du åpner appen, kommer du til en velkomstskjerm for Levilogs startguide. Klikk på «Start guiden» for å begynne å registrere deg.

### 3.4.1 Verifisere resepten din

Deretter kommer du til å bes om å bekrefte at du har en gyldig resept. Du bekrefter dette ved å oppgi «VNR»-nummeret som du finner på forpakningen og dosedispenseren.

Det finnes to måter å gjøre dette på:

1. Ved å ta et bilde av dosedispenseren eller medisinforpakningen med kameraet ditt. Sørg for å tillate tilgang til kameraet når du blir bedt om det, og følg deretter instruksjonene som gis.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

2. Ved å skrive inn nummeret manuelt. Velg i så fall alternativet «Jeg ønsker ikke å bruke kameraet». Følg deretter instruksjonene appen gir deg.

### 3.4.2 Gi appen tillatelse til å behandle dataene dine.

Du må gi samtykke for at Levilog skal kunne innhente og behandle informasjon om medisinene dine og medisininntaket ditt. Dette er nødvendig for å kunne gi deg en best mulig opplevelse og håndtere doseringsskjemaet ditt.

Trykk på «Jeg samtykker» for å godkjenne og gå videre til neste trinn. Du kan lese mer om hvordan informasjonen din behandles ved å trykke på linken «Personvernpolicy».

### 3.4.3 Opprette konto

Dersom du bruker en Android-enhet, kan du registrere deg enten via Google-kontoen din eller med e-post og passord. Dersom du bruker en iPhone, finnes de samme alternativene, samt muligheten til å bruke Apple-kontoen din.

Dersom du velger å registrere deg med e-post og passord, kommer du til å måtte verifisere e-postadressen din. Du mottar en e-post med en verifiseringskode, som du må oppgi i appen for å kunne gå videre.

### 3.4.4 Opprette doseringsskjemaet ditt

I dette trinnet legger du inn det daglige doseringsskjemaet ditt i appen. Siden appen lar deg gjøre dette selv, er det viktig at du selv tar ansvar for å følge legens ordinasjon.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

### **Dersom legen din har gitt deg et papir med skjemaet ditt**

Velg «Ja, det har jeg» på spørsmålet om du har fått et skjema fra legen din for å legge inn skjemaet i appen ved å ta et bilde. Følg deretter disse instruksjonene:

1. Dersom det er første gang appen bruker kameraet, må du begynne med å tillate at appen bruker kameraet.
2. Tillat deretter appen å bearbeide data i bilder.
3. Ta et bilde av papiret med skjemaet ditt, og vent på at appen analyserer bildet og oppretter skjemaet ditt.
4. Gjennomgå skjemaet appen foreslår grundig. Vær oppmerksom på at KI-en som analyserer bildene, kan gjøre feil, så det er viktig å sjekke at tidspunkter og antall tabletter for hver dose er korrekte.

### **Dersom du ikke har fått et ark med skjemaet ditt, eller ikke ønsker å bruke kameraet**

Velg «Nei, jeg har ikke noe skjema» på spørsmålet om du har fått et skjema fra legen din, og opprett skjemaet manuelt ved å følge disse trinnene:

1. Klikk på «Legg til dose» for å opprette den første dosen.
2. Angi tidspunkt og antall piller, og velg deretter «Lagre».
3. Gjenta prosessen for hver dose til du har opprettet hele det foreskrevne skjemaet.

Vær nøye med å sikre at doseringsskjemaet i appen stemmer nøyaktig overens med instruksjonene legen din ga deg. Du bør kun endre skjemaet ditt etter råd fra legen din.

#### **3.4.5 Aktivere varsler**

For å motta påminnelser om å ta medisinen din, må du tillate at appen sender varsler. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør dette, siden varsler er en viktig funksjon som hjelper deg med å ta riktig dose av medisinen din til rett tidspunkt.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

1. Når du blir spurt om Levilog kan sende deg varsler, må du velge «Tillat». Dersom du velger «Ikke tillat», kommer du ikke til å motta noen påminnelser fra appen.

Dersom du ved et uhell velger «Ikke tillat», kan du endre dette i telefonens innstillinger.

2. Dersom du tillater varsler og bruker en iPhone, kommer du til å bli spurt om hvorvidt du ønsker at varslene skal spille av lyd, selv når telefonen er satt til lydløs. Dette anbefales slik at du ikke går glipp av noen viktige påminnelser. For å aktivere dette:
  - a. Velg «Ja, aktiver varsler alltid».
  - b. Trykk på «Tillat» når telefonen spør om du ønsker å tillate kritiske alarmer.
3. På neste skjermbilde kan du granske og redigere innstillingene dine for varsler.

#### 3.4.6 Angi påminnelser for påfylling av medisin

Til slutt må du angi påminnelser for påfylling av medisin i funksjonen «Gjenværende tabletter».

For at appen skal kunne beregne antall gjenværende tabletter korrekt, må den vite når du begynte å bruke den nåværende dosedispenseren din. Denne informasjonen brukes til å varsle deg når det er på tide å bytte til en ny dispenser.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

Dersom du ikke husker når du begynte å bruke den nåværende dispenser, kan du hoppe over dette trinnet nå. Neste gang du starter på en ny dispenser, har du muligheten til å legge til startdatoen på «Medisin»-skjermbildet.

### 3.5 Logge inn

Dersom du logger ut eller bytter enhet, kan du logge inn på den eksisterende kontoen din igjen ved å velge «Jeg har allerede en konto» på velkomstskjermen. Velg deretter samme innloggingsmetode som du brukte da du opprettet kontoen, enten Google, Apple (dersom du bruker en iPhone) eller e-post.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

## 4. Slik bruker du Levilog

Bruk Levilog for å motta påminnelser om når det er på tide å ta medisinen din, og for å logge når du har tatt dosen din i appen.

Du navigerer i appen ved å klikke på ikonene helt nederst på skjermen.

### 4.1 Varsler

Du kommer til å motta et varsel når det er på tide å ta medisinen din. Trykk på varselet for å åpne appen og logge dosen din.

Dersom du ikke reagerer på varselet, kan du motta en ny påminnelse etter 5 og 15 minutter. Du velger selv om du ønsker å ha disse ekstra påminnelsene når du oppretter kontoen din, og kan deretter når som helst endre disse innstillingene i appen.

### 4.2 Din dag

Du får tilgang til dette skjermbildet ved å trykke på «Din dag» i menyen helt nederst.

På dette skjermbildet kan du logge de planlagte dosene dine. Dersom det ikke er på tide å logge en dose ennå, vises tidspunktet for når neste dose skal tas. Du kan velge «Logg tidlig» dersom du tar denne dosen før planlagt tidspunkt. Dersom du gjør det, telles den som tatt, og varslene for den dosen kommer ikke til å komme.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

Nederst på skjermen finnes det et område der du kan registrere eventuelle ekstra doser du tar. For å logge en ekstra dose trykker du på «Logg ekstra dose» og angir antall tabletter du har tatt og når.

### 4.3 Historikk

Du får tilgang til dette skjermbildet ved å trykke på «Historikk» i menyen helt nederst. I den øvre delen av skjermen vises dosene du allerede har logget i dag. Ved å trykke på en dose på listen kan du se og redigere detaljer.

Når du skroller ned, vises en oversikt over alle dosene du noen gang har logget i appen. Klikk for å åpne en visning der du kan se innsikter som «gjennomsnittlig daglig dosering». For å se detaljer om en bestemt dag trykker du på den dagen.

### 4.4 Medisin

Du får tilgang til dette skjermbildet ved å trykke på «Medisin» i den nederste menyen. Her finner du flere funksjoner som gjør det lettere å håndtere medisineringsen din.

- **Ditt medisinskjema**

Her kan du se tidspunkter og doser for planlagt medisininntak. Dersom du trenger å gjøre endringer, kan du trykke på «Endre skjema». Endre skjemaet utelukkende i henhold til legens instruksjoner.

- **Gjenværende tabletter**

Her kan du se et estimat av hvor mange tabletter du har igjen i

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

dosedispenseren. Når det er på tide å starte på en ny dispenser, kan du registrere det ved å trykke på «Start ny»

- **Slik bruker du dispenseren din**

Her finner du veiledning om hvordan du håndterer dispenseren din. Trykk på «Se instruksjon» for detaljert informasjon.

- **Lydsignal ved lydløs**

Dersom du bruker en iPhone og har valgt å ha påminnelser som spiller av lyd selv når telefonen er på lydløs, er det også mulig å slå av denne lyden midlertidig herfra.

## 4.5 Innstillinger


I det øvre hjørnet på hver skjerm finnes det et lite tannhjul. Ved å trykke på det kommer du til appens innstillinger. Der finnes innstillinger for varsler, muligheten til å kontakte teknisk støtte, informasjon om appen (appens merking, der også linken til denne bruksanvisningen finnes), samt brukeravtalen din og samtykkene dine. Du kan også endre innstillingene for kontoen din, for eksempel e-postadresse eller passord, og også logge ut eller slette kontoen din. OBS. Dersom du velger å slette kontoen din, slettes alle loggede data, og kontoen kan ikke gjenopprettes.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

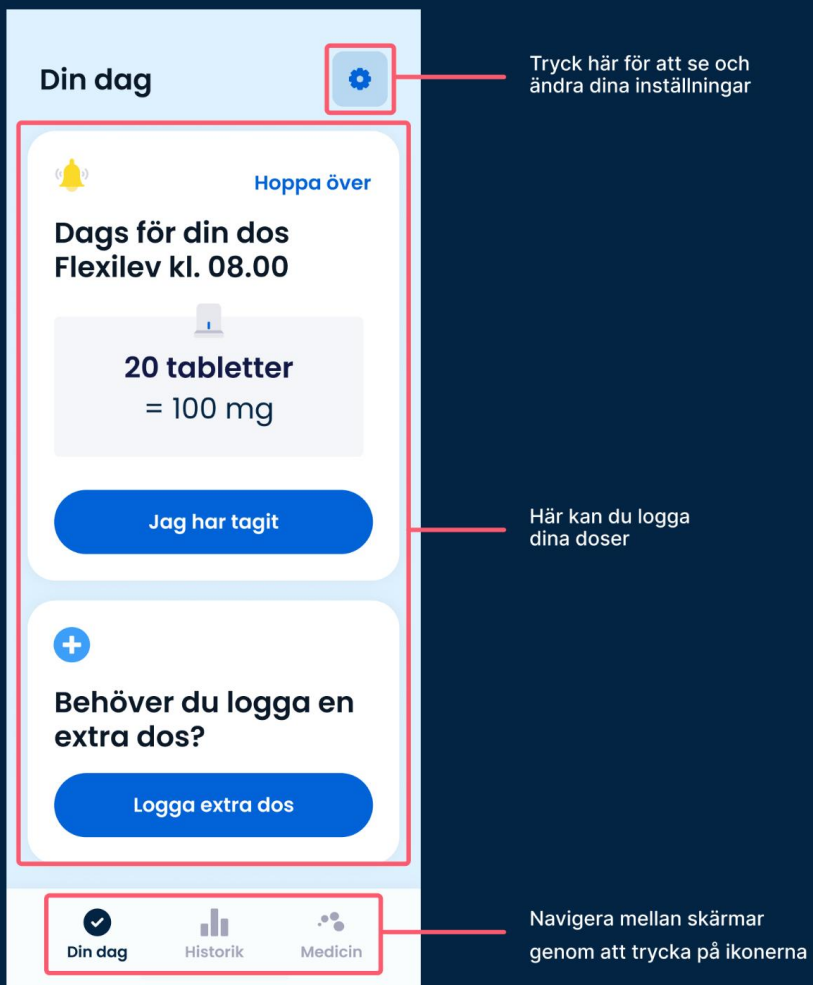

Dokumentnummer:  
AT06-17 (NO)

Dokumentversjon  
4.0

Dato:  
25. mai 2026

Produktversjon  
1.0

## 4.6 Hvor ofte bør du bruke Levilog?

Åpne Levilog minst én gang om dagen når telefonen din har internettforbindelse. Dette er nødvendig for at appen skal kunne planlegge varsler for kommende dager og fortsette å sende påminnelser.

Levilog fungerer best dersom du registrerer dosene dine nøyaktig. Sørg for å logge hver gang du tar medisinen din, både planlagte og ekstra doser. Dette gir deg en fullstendig historikk over medisininntaket ditt og sikrer at estimatet av «Gjenværende tabletter» blir korrekt.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

## 5. Teknisk støtte

### 5.1 Kontakt støtten

Dersom du støter på tekniske problemer, føler deg usikker eller oppdager noe som ikke ser riktig ut, klikker du på tannhjulet øverst på skjermbildene «Din dag», «Historikk» eller «Medisin». Bla gjennom listen og velg «Kontakt støtten» for å sende en e-post til støtteteamet. De kommer til å bistå deg videre. Du kan forvente å motta svar den neste virkedagen etter at du sendte forespørselen.

Dersom du ikke får tilgang til appen, kan du også kontakte støtteteamet ved å sende en e-post direkte til [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com).

### 5.2 Tilbakestill passord

Dersom du har glemt passordet ditt, klikker du på «Glemt passord?» på innloggingssiden og skriver inn e-postadressen din. Når du mottar en e-post (sjekk søppelpostmappen dersom det tar lang tid), kopierer du verifiseringskoden og går tilbake til appen for å velge et nytt passord.

Dersom du ikke får tilgang til appen, kan du sende oss en e-post til [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com).

### 5.3 Skriv ut bruksanvisningen

Bruksanvisningen forsynes i et utskriftsvennlig format. Velg skriverfunksjonen i nettleseren din.

Du kan også be om bruksanvisningen i papirform ved å sende en e-postforespørsel til [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com). Bruksanvisningen sendes per post innen en uke uten ekstra kostnad.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

## 6. Ordliste over ISO-symboler

Symbolene som brukes i denne appen følger standarden EN-ISO 15223-1:2021, som sikrer tydelig og konsekvent kommunikasjon av medisinsk informasjon.



Produsent



Produksjonsdato



Medical Device

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0



Unique Device Identification



Konsulter bruksanvisningen

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0

## 7. Kontaktinformasjon

Navamedic AB  
Göteborgsvägen 74  
433 63 Sävedalen  
Sverige

**[info@navamedic.com](mailto:info@navamedic.com)**

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (NO)

**Dokumentversjon**  
4.0

**Dato:**  
25. mai 2026

**Produktversjon**  
1.0