



Levilog

Bruksanvisning

Datum: 25 maj 2026

Dokumentnummer: AT06-17 (SV)

Dokumentversion: 4.0

Produktversion: 1.0

Produkt-ID: AT06

Grundläggande UDI-DI: 73323531000LX

CE

Levilog	1
Bruksanvisning	1
1. Om Levilog	3
1.1 Tillverkare	4
1.2 Avsedd användning	4
1.3 Vem får använda Levilog?	4
1.4 Kontraindikationer	5
1.5 Hur fungerar Levilog?	5
1.5.1 Medicinpåminnelser i rätt tid	5
1.5.2 Logga dina doser	5
1.5.3 Du behöver ha ett giltigt recept	5
2. Information om risker och nytta	6
2.1 Risker med att använda Levilog	6
2.2 Nyttan med att använda Levilog	6
2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder	6
2.4 Anmäl allvarliga tillbud	8
3. Kom igång	8
3.1 Tekniska krav	8
3.2 Mjukvaruuppdateringar och systemkrav	8
3.2.1 Mjukvaru- och säkerhetsuppdateringar	8
3.2.2 Systemkrav	9
3.3 Installation	9
3.3.1 Så här installerar du Levilog på din iPhone eller iPad:	9
3.3.2 Så här installerar du Levilog på din Android:	10
3.4 Registrering	10
3.4.1 Verifiera ditt recept	10
3.4.2 Ge appen tillstånd att behandla din data.	11
3.4.3 Skapa konto	11
3.4.4 Skapa ditt doseringsschema	11
3.4.5 Aktivera notiser	12
3.4.6 Ställ in påminnelser för medicinpåfyllning	13

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

3.5 Logga in	14
4. Så använder du Levilog	15
4.1 Notiser	15
4.2 Din dag	15
4.3 Historik	16
4.4 Medicin	16
4.5 Inställningar	17
4.6 Hur ofta bör du använda Levilog?	19
5. Teknisk support	20
5.1 Kontakta support	20
5.2 Återställ lösenord	20
5.3 Skriv ut bruksanvisningen	20
6. Ordlista över ISO-symboler	22
7. Kontaktinformation	24

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

1. Om Levilog

1.1 Tillverkare

Navamedic AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen
Sverige

1.2 Avsedd användning

Levilog är avsedd att stödja behandlingen av Parkinsons sjukdom genom att underlätta följsamhet till föreskriven medicinering. Levilog ger patienter påminnelser för att hjälpa dem ta rätt dos vid rätt tidpunkt samt logga och följa upp sitt medicinintag.

1.3 Vem får använda Levilog?

Levilog är avsedd för dig om:

- Du använder ett läkemedel som distribueras med hjälp av en OraFID dosdispenser för att behandla din Parkinsons sjukdom.
- Du är 18 år eller äldre.
- Du är bekant med hur man använder smartphones och mobilappar.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

1.4 Kontraindikationer

Appen ska endast användas för att hantera läkemedelsbehandlingar som distribueras med hjälp av en OraFID, den är inte lämplig att använda för att hantera någon annan medicinering.

1.5 Hur fungerar Levilog?

1.5.1 Medicinpåminnelser i rätt tid

Levilog kommer att skicka notiser för att varna dig när det är dags för din läkemedelsdos. När du trycker på en notis öppnas appen så att du kan registrera att du har tagit dosen. Levilog skickar också notiser när du börjar få slut på tabletter i din nuvarande OraFID-dispenser, så att du kan se till att du har en ny dispenser redo.

1.5.2 Logga dina doser

Du kan navigera till skärmen "Din dag" för att logga dina schemalagda doser eller extra doser av din medicin.

Ju noggrannare du loggar ditt intag av din medicin, desto bättre kommer appen att fungera för dig. Du kommer till exempel att få lägliga påminnelser när din OraFID-dispenser håller på att ta slut, en korrekt historik, samt insikter om hur mycket medicin du har tagit från dag till dag.

1.5.3 Du behöver ha ett giltigt recept

För att få tillgång till Levilog behöver du ett giltigt recept på en medicin som distribueras i en OraFID-dispenser. För att kunna skapa ett konto kommer du därför att behöva bekräfta ditt recept genom att skanna ett nummer på din

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

läkemedelsförpackning eller din dosdispenser, så se till att du har din medicin i närheten första gången du öppnar appen.

2. Information om risker och nytta

2.1 Risker med att använda Levilog

Det finns inga kända allvarliga risker med att använda Levilog. Däremot är det ett stödverktyg och bör inte användas som den enda metoden för att säkerställa korrekt medicinhantering. Levilogs funktionalitet beror på korrekt användarinmatning, rätt systeminställningar och en stabil internetuppkoppling.

2.2 Nyttan med att använda Levilog

Levilog hjälper dig att följa din ordinerade dosering. Genom att ta din medicin vid varje föreskriven tidpunkt enligt din läkares ordination ökar du chanserna att få en stabil lindring av dina symtom.

2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder

- **För att få medicinpåminnelser måste du tillåta att appen skickar notiser.** Du kommer att bli ombedd att tillåta detta när du skapar ditt konto. Om du säger nej kan du senare gå in i din telefons inställningar och aktivera notiser.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

- **För att fortsätta få dina medicinpåminnelser måste du öppna appen minst en gång om dagen när telefonen är ansluten till internet.** På detta sätt säkerställer du att appen alltid kan schemalägga nya notiser.
- **För att alltid få påminnelser från Levilog, se till att din telefon eller surfplatta inte får slut på batteri.**
- När du använder kameran för att lägga till eller uppdatera ditt doseringsschema kan vissa begränsningar finnas, eftersom AI:n som analyserar bilden kan göra fel. **Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar antalet tabletter och tidpunkterna för dina doser när du skapar ditt schema med hjälp av kameran.** På så sätt kan du säkerställa att ditt schema överensstämmer med det din läkare ordinerat.
- **Ändra endast ditt schema enligt din läkares instruktioner.** Levilog är designad så att du själv kan anpassa ditt doseringsschema i appen efter de direktiv din läkare har gett. Det är därför viktigt att du noggrant följer dessa anvisningar.
- **Var medveten om att "Tabletter kvar"-funktionen påverkas av startdatum och hur du loggar dina doser.** Appen räknar det totala antalet tabletter i dosdispensern och drar automatiskt av dina schemalagda doser, även om du inte loggar dem aktivt. Om du tillför extra doser, markerar doser som "missade", eller ändrar antalet tabletter i en dos, tar appen hänsyn till dessa ändringar och uppdaterar beräkningen av kvarvarande tabletter.
- När du reser anpassas ditt medicinschema automatiskt till telefonens tidszon. Om du till exempel ska ta en dos kl. 8:00 och reser till en annan tidszon, får du en påminnelse att ta dosen kl. 8:00 i den nya tidszonen. **Innan du reser mellan olika tidszoner är det viktigt att du diskuterar med din läkare hur du bäst hanterar ditt medicinschema.**

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

Anmäl negativa eller oönskade händelser, tillbud och olyckor som är relaterade till användningen av Levilog till Navamedic AB och Läkemedelsverket.

2.4 Anmäl allvarliga tillbud

Anmäl negativa eller oönskade händelser, tillbud och olyckor som är relaterade till användningen av Levilog till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du är etablerad, dvs. Läkemedelsverket (i Sverige), Skattestyrelsen – Central Customs Division (i Danmark), Fimea – Läkemedelsverket (i Finland) och Legemiddelverket (i Norge).

Vänligen informera tillverkaren, Navamedic AB, via e-post: info@navamedic.com.

3. Kom igång

3.1 Tekniska krav

För att använda Levilog behöver du tillgång till en smartphone eller surfplatta med iOS 18 eller senare, eller Android 15 eller senare. Du behöver också ha en pålitlig internetanslutning.

3.2 Mjukvaruuppdateringar och systemkrav

För att säkerställa att enheten fungerar säkert och effektivt gäller följande bestämmelser för programuppdateringar och kompatibilitet med operativsystem:

3.2.1 Mjukvaru- och säkerhetsuppdateringar

- Applikationen kan få regelbundna programuppdateringar, inklusive säkerhetskorrigeringar, prestandaförbättringar och nya funktioner.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

- Uppdateringar levereras via de officiella distributionsplattformarna för appar (Apple App Store eller Google Play Store).
- Integriteten och äktheten hos alla uppdateringar valideras automatiskt av plattformen innan installation.
- Det rekommenderas att aktivera automatiska uppdateringar för att säkerställa att enheten alltid kör den senast validerade programvaruversionen.

3.2.2 Systemkrav

- Kompatibilitet med nyare operativsystem övervakas och testas regelbundet; användare kan behöva uppdatera operativsystemet på deras enhet för att bibehålla säkerhet och funktionalitet.
- Användning av applikationen på operativsystem som inte stöds eller är för gamla kan leda till begränsad funktionalitet eller att den inte går att använda.

3.3 Installation

3.3.1 Så här installerar du Levilog på din iPhone eller iPad:

1. Öppna App Store.
2. Skriv "Levilog" i sökfältet och hitta appens vars ikon ser ut som den bifogade logotypen.



3. Tryck på "Installera".
4. Ange ditt lösenord för Apple ID.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

5. När appen är installerad trycker du på appens ikon för att öppna Levilog.

3.3.2 Så här installerar du Levilog på din Android:

1. Öppna Google Play Store.
2. Skriv "Levilog" i sökfältet och hitta appens vars ikon ser ut som den bifogade logotypen.



3. Tryck på "Installera".
4. När appen är installerad trycker du på appens ikon för att öppna Levilog.

3.4 Registrering

När du öppnar appen kommer du till en välkomstkärm för Levilogs startguide. Klicka på "Starta guiden" för att börja registrera dig.

3.4.1 Verifiera ditt recept

Därefter kommer du att bli ombedd att bekräfta att du har ett giltigt recept. Du bekräftar detta genom att ange "VNR"-numret som du hittar på förpackningen och dosdispensern.

Det finns två sätt att göra detta:

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

1. Genom att ta ett foto med din kamera av din dosdispenser eller medicinförpackningen. Se till att tillåta åtkomst till kameran när du blir tillfrågad och följ sedan instruktionerna som ges.
2. Genom att skriva in numret manuellt. Välj i så fall alternativet "Jag vill inte använda kameran". Följ sedan instruktionerna som appen ger dig.

3.4.2 Ge appen tillstånd att behandla din data.

Du behöver ge ditt samtycke för att Levilog ska kunna samla in och behandla information om dina mediciner och ditt medicinintag. Detta är nödvändigt för att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen och hantera ditt doseringsschema.

Tryck på "Jag samtycker" för att godkänna och fortsätta till nästa steg. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter hanteras genom att trycka på länken "Integritetspolicy".

3.4.3 Skapa konto

Om du använder en Android-enhet kan du registrera dig antingen via ditt Google-konto eller med e-post och lösenord. Använder du en iPhone finns samma alternativ, samt möjligheten att använda ditt Apple-konto.

Väljer du att registrera dig med e-post och lösenord kommer du att behöva verifiera din e-postadress. Du får ett e-postmeddelande med en verifieringskod som du måste ange i appen för att kunna fortsätta.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

3.4.4 Skapa ditt doseringsschema

I detta steg ska du lägga in ditt dagliga doseringsschema i appen. Eftersom appen låter dig göra detta själv är det viktigt att du själv tar ansvar för att följa din läkares ordination.

Om din läkare har gett dig ett papper med ditt schema

Välj "Ja, det har jag" på frågan om du har fått ett schema från din läkare för att lägga in schemat i appen genom att ta ett foto. Följ sedan dessa instruktioner:

1. Om det är första gången appen använder kameran behöver du börja med att tillåta appen att använda kameran.
2. Tillåt sedan appen att bearbeta data i bilder.
3. Ta ett foto av pappret med ditt schema och vänta på att appen analyserar bilden och skapar ditt schema.
4. Granska noggrant det schema som appen föreslår. Var medveten om att AI:n som analyserar bilderna kan göra fel, så det är viktigt att kontrollera tider och antalet tabletter för varje dos har blivit korrekt.

Om du inte har fått ett papper med ditt schema eller inte vill använda kameran

Välj "Nej, jag har inget schema" på frågan om du har fått ett schema från din läkare och skapa ditt schema manuellt genom att följa dessa steg:

1. Klicka på "Lägg till dos" för att skapa din första dos.
2. Ange tid och antal piller, välj sedan "Spara".
3. Upprepa processen för varje dos tills du har skapat hela ditt ordinerade schema.

Var noggrann med att se till att doseringsschemat i appen överensstämmer exakt med de instruktioner din läkare gav dig. Du bör endast ändra ditt schema på din läkares inrådan.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

3.4.5 Aktivera notiser

För att få påminnelser om att ta din medicin behöver du tillåta att appen skickar notiser. Vi rekommenderar starkt att du gör detta eftersom notiser är en viktig funktion som hjälper dig att ta din medicin rätt dos vid rätt tidpunkt.

1. När du får frågan om Levilog får skicka notiser till dig, behöver du välja "Tillåt". Om du väljer "Tillåt inte" kommer du inte att få några påminnelser från appen.

Om du av misstag väljer "Tillåt inte" kan du ändra detta i telefonens inställningar.

2. Om du tillåter notiser och använder en iPhone, kommer du att få en fråga om du vill att dina notiser ska spela ljud även när din telefon är inställd på ljudlöst. Detta rekommenderas så att du inte missar några viktiga påminnelser.

För att aktivera detta:

- a. Välj "Ja, aktivera notiser alltid".
 - b. Tryck på "Tillåt" när telefonen frågar om du vill tillåta kritiska larm.
3. På nästa skärm kan du granska och redigera dina inställningar för notiser.

3.4.6 Ställ in påminnelser för medicinpåfyllning

Slutligen ska du ställa in påminnelser för medicinpåfyllning i funktionen "Tabletter kvar".

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

För att appen ska kunna beräkna antalet kvarvarande tabletter korrekt behöver den veta när du började använda din nuvarande dosdispenser. Denna information används för att meddela dig när det är dags att byta till en ny dispenser.

Om du inte minns när du började använda din nuvarande dispenser kan du hoppa över detta steg nu. Nästa gång du påbörjar en ny dispenser har du möjlighet att lägga till startdatumet på din "Medicin"-skärm.

3.5 Logga in

Om du loggar ut eller byter enhet kan du logga in på ditt befintliga konto igen genom att välja "Jag har redan ett konto" på välkomstskärmen. Välj sedan samma inloggningsmetod som du använde när du skapade kontot, antingen Google, Apple (om du använder en iPhone) eller e-post.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

4. Så använder du Levilog

Använd Levilog för att få påminnelser om när det är dags att ta din medicin och för att logga i appen när du har tagit din dos.

Du navigerar i appen genom att klicka på ikonerna längst ned på skärmen.

4.1 Notiser

Du får en notis när det är dags att ta din medicin. Tryck på notisen för att öppna appen och logga din dos.

Om du inte agerar på notisen kan du få en ny påminnelse efter 5 och 15 minuter. Du väljer själv om du vill ha dessa extra påminnelser när du skapar ditt konto, och kan sedan när som helst ändra dessa inställningar i appen.

4.2 Din dag

Du kommer åt denna skärm genom att trycka på "Din Dag" i menyn längst ned.

På denna skärm kan du logga dina schemalagda doser. Om det inte är dags att logga en dos ännu visas tiden för när nästa dos ska tas. Du kan välja "Logga tidigt" om du tar denna dos innan utsatt tid, om du gör det kommer den räknas som tagen och notiserna för den dosen kommer inte att komma.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

Nederst på skärmen finns ett område där du kan registrera eventuella extra doser du tar. För att logga en extra dos, tryck på 'Logga extra dos' och ange antalet tabletter du tagit och när.

4.3 Historik

Du når denna skärm genom att trycka på "Historik" i menyn längst ned. I övre delen av skärmen visas de doser du redan har loggat idag. Genom att trycka på en dos i listan kan du se och redigera detaljer.

När du scrollar ner visas en översikt över alla doser du någonsin har loggat i appen. Klicka för att öppna en vy där du kan se insikter som "genomsnittlig daglig dosering". För att se detaljer om en specifik dag, tryck på den dagen.

4.4 Medicin

Du når denna skärm genom att trycka på "Medicin" i den nedre menyn. Här finns flera funktioner som underlättar hanteringen av din medicinering.

- **Ditt medicinschema**

Här ser du tider och doser för dina schemalagda medicinintag. Om du behöver göra ändringar kan du trycka på "Ändra schema". Ändra endast ditt schema enligt läkarens ordination.

- **Tabletter kvar**

Här ser du en uppskattning av hur många tabletter du har kvar i din dosdispenser. När det är dags att börja en ny dispenser kan du registrera

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

det genom att trycka på "Påbörja ny"

- **Hur du använder din dispenser**

Här finns vägledning för hur du hanterar din dispenser. Tryck på "Se instruktion" för detaljerad information.

- **Ljudsignal vid ljudlös**

Om du använder en iPhone och har valt att ha påminnelser som spelar ljud även när din telefon är på ljudlöst, finns också möjlighet att härifrån tillfälligt stänga av det ljudet.

4.5 Inställningar


I övre hörnet på varje skärm finns ett litet kugghjul. Genom att trycka på det kommer du till appens inställningar. Där finns inställningar för notiser, möjlighet att kontakta teknisk support, information om appen (appens märkning, där även länken till denna bruksanvisning finns), samt ditt användaravtal och dina samtycken. Du kan även ändra inställningar för ditt konto, såsom e-postadress eller lösenord, och även logga ut eller ta bort ditt konto. OBS. Om du väljer att ta bort ditt konto kommer all din loggade data raderas och kontot kan inte återskapas.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

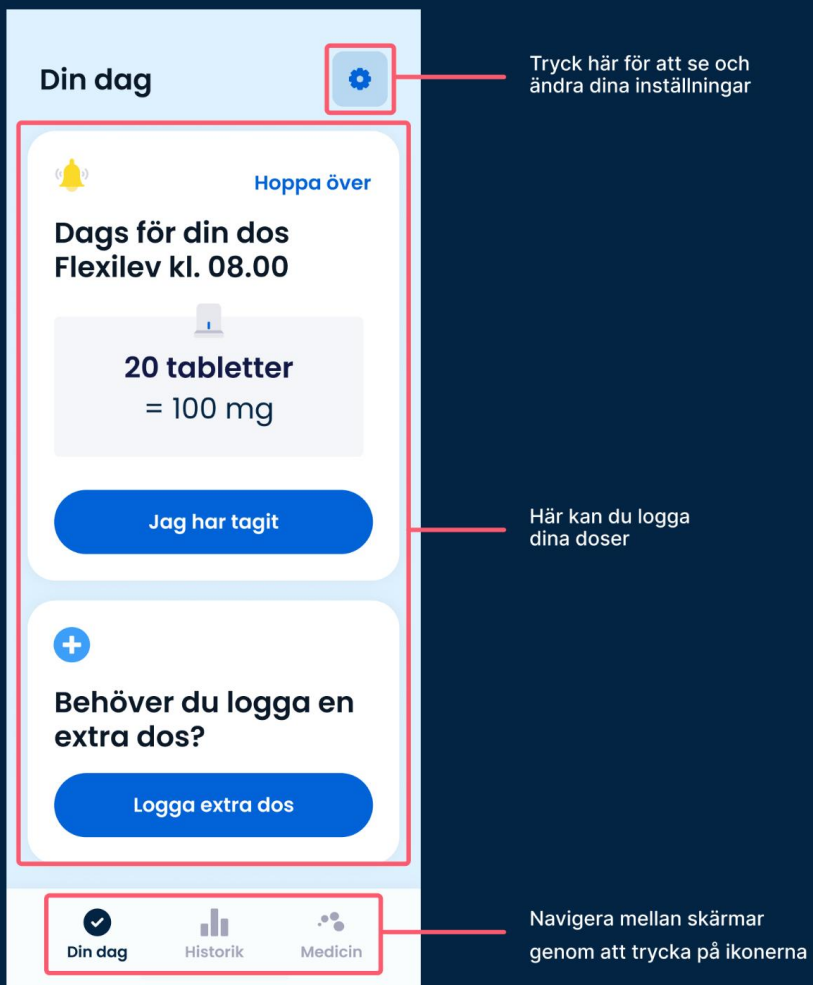

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

4.6 Hur ofta bör du använda Levilog?

Öppna Levilog minst en gång om dagen när din telefon har internetanslutning. Detta är nödvändigt för att appen ska kunna schemalägga notiser för kommande dagar och fortsätta skicka påminnelser.

Levilog fungerar bäst om du registrerar dina doser noggrant. Se till att logga varje gång du tar din medicin, både dina schemalagda och extra doser. Detta ger dig en komplett historik över ditt medicinintag och säkerställer att uppskattningen av "Tabletter kvar" blir korrekt.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

5. Teknisk support

5.1 Kontakta support

Om du stöter på tekniska problem, känner dig osäker, eller upptäcker något som inte verkar stämma, klicka på kugghjulet högst upp på skärmarna "Din Dag", "Historik" eller "Medicin". Bläddra i listan och välj "Kontakta support" för att skicka ett e-postmeddelande till supportteamet. De kommer att bistå dig vidare. Du kan räkna med att få ett svar nästkommande vardag från det att du skickat din förfrågan.

Om du inte kan komma åt appen kan du också nå supportteamet genom att mejla direkt till levilogsupport@navamedic.com.

5.2 Återställ lösenord

Om du har glömt ditt lösenord, klicka på "Glömt lösenord?" på inloggningssidan och skriv in din e-postadress. När du fått ett e-postmeddelande (kontrollera skräppostmappen om det dröjer), kopiera verifieringskoden och gå tillbaka till appen för att välja ett nytt lösenord.

Om du inte kan komma åt appen, mejla oss på levilogsupport@navamedic.com.

5.3 Skriv ut bruksanvisningen

Bruksanvisningen tillhandahålls i ett utskriftsvänligt format. Välj skrivarfunktionen i din webbläsare.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

Du kan också begära bruksanvisningen i pappersform genom att skicka en e-postförfrågan till levilogssupport@navamedic.com. Bruksanvisningen skickas per post inom en vecka utan extra kostnad.

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)


Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026


Produktversion
1.0

6. Ordlista över ISO-symboler

Symbolerna som används i denna app följer EN-ISO 15223-1:2021-standarden, vilket garanterar tydlig och konsekvent kommunikation av medicinsk information.

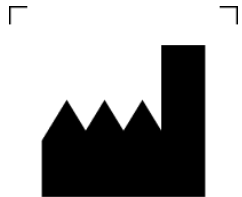

Tillverkare

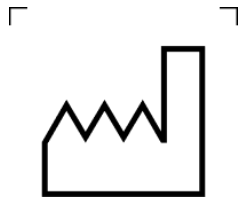

Datum för tillverkning



Medical Device

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0



Unique Device Identification



Konsultera bruksanvisningen

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0

7. Kontaktinformation

Navamedic AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen
Sverige

info@navamedic.com

Dokumentnummer
AT06-17 (SV)

Dokumentversion
4.0

Datum
25 maj 2026

Produktversion
1.0